

# KLUSWIJZER ROLLATOR-REMMEN AFSTELLEN

VRAGEN OF TIPS: MAIL@HETZALWERKEN.NL


HET ZAL WERKEN

## CONTROLLEREN



Knijp remmen in en beweeg de rollator op achterwielen langzaam voor- en achteruit (1). De remmen werken als de wielen blokkeren, soms glijden gladde wielen op een gladde ondergrond.

Controleer op vergelijkbare wijze ook de parkeerstand, meestal door de remgrepen naar beneden te drukken (2). De parkeerstand is belangrijk als mensen op hun rollator zitten, bij het opstaan van een stoel of als de rollator meegaat in bijvoorbeeld openbaar vervoer of rolstoelliften.

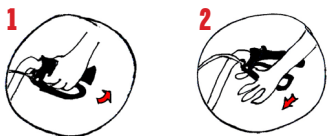


Wanneer de kabelstelsbout al op maximale afstand staat en de remmen nog steeds niet goed werken, schuif dan de schroefnippel aan het eind van de kabel op. Draai wel eerst

## AFSTELLEN



### 'STANDAARD'

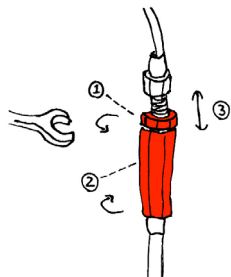

- › De kabelspanner zit halverwege de remkabel. Soms is er een extra stel mogelijkheid bij de handgreep.
- › Draai eerst de borgmoer los (1).
- › Draai de kabelspanner verder uit tot de ruimte tussen remblok en wiel ca. 2 mm is. Het wiel moet bij open rem nog vrij kunnen draaien.
- › Draai de borgmoer weer aan.




### ELEPHANTJE, ECO, ETC

- ↳ Modellen waarbij de kabelspanner halverwege de remkabel zit.
- ↳ Modellen waarbij de kabelspanner geplaatst is op het frame bij het achterwiel. →




### ULTRA, GEMINO, TROJA, ETC

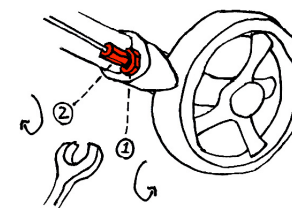

- › De kabelspanner is geplaatst op de frame bij het achterwiel.
- › Draai eerst de borgmoer los (1).
- › Draai de kabelspanner (2) verder uit tot de ruimte tussen remblok en wiel ca. 2 mm is. Het wiel moet bij open rem nog vrij kunnen draaien.
- › Draai de borgmoer weer aan.



### ACTIVE ACCES (ANWB)

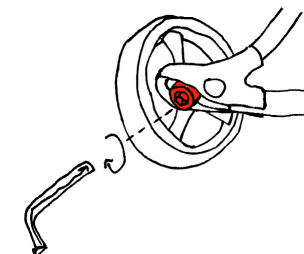

- › De inbusbout om de remmen mee te verstellen is geplaatst aan het ondereind van het frame bij het achterwiel.
- › Draai met een inbussleutel M5 (meegeleverd) de bout met de klok mee om hem strakker af te stellen, tot de tuimte tussen rem en wiel ca. 2 mm is. Het wiel moet bij open rem nog vrij kunnen draaien.